


Stilvoll, intelligent + vereinfacht

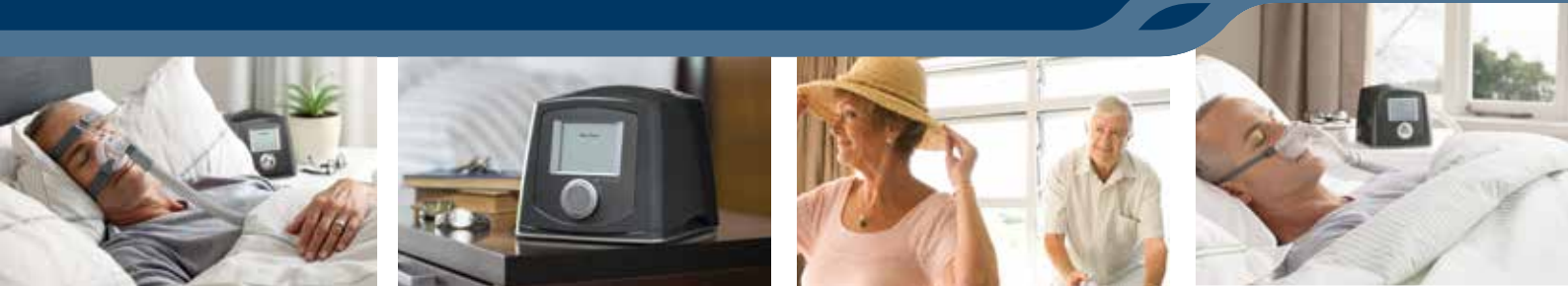

F&P ICON+ jetzt mit einfacher Handhabung

und den folgenden Merkmalen:

- + Vereinfachte Handhabung, inklusive Einfach-Modus für Patienten
- + Stilvolle neue Farbgebung
- + Intelligente klinische Technologien

Wir haben auf unsere Kunden gehört und bieten jetzt ein leicht zugängliches Klinikermenü und einen vereinfachten Patientenmodus an. Der neue Patientenmodus bietet einfachen Zugriff auf die drei am häufigsten benutzten Einstellungen (Ein/Aus, Rampe, Luftfeuchtigkeit). Durch diese Verbesserungen werden der Aufwand für die Patienteneinrichtung und die Einweisungszeit in das Produkt minimiert, was die Akzeptanz bei Anwender und Patienten erhöht.





Selbstregulierende Druckverringerung.

SensAwake sorgt umfassend für besseren Schlaf. Wir alle haben nachts unbewusste Wachzustände – dabei kann es leicht zu einer Druckunverträglichkeit kommen. Während andere Druckabsenkungstechnologien über eine teilweise Druckabsenkung beim Ausatmen verfügen, bietet SensAwake nach dem Aufwachen eine prompte und signifikante Druckabsenkung auf das niedrigste und verträglichste Niveau. Dies erleichtert die Rückkehr in den Schlaf und ermöglicht die Fortführung einer effektiven Behandlung.

Simuliert die Reaktionsfähigkeit eines Technikers auf Druckintoleranz:



Entdeckt Wachzustände **Schnelle Druck entlastung** **Erleichtert die Rückkehr** in den Schlaf




Mehr Luftfeuchtigkeit. Mehr Komfort.

Die ThermoSmart Technologie repräsentiert am ehesten die Luftbefeuchtungsphilosophie von Fisher & Paykel Healthcare und ist in jedem Modell der F&P ICON+ Produktreihe integriert.

Diese Technologie verfügt über einen fortschrittlichen Luftbefeuchtungsalgorithmus und einen beheizten Beatmungsschlauch, die für optimale Luftfeuchtigkeit und geringere Kondensation sorgen.

Luftbefeuchtung mit beheiztem Beatmungsschlauch

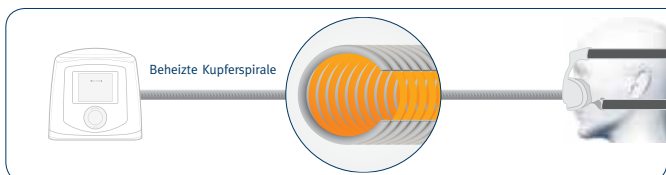

Warmer Schlauch: Wärmeverlust + Wärmezufuhr von beheiztem Beatmungsschlauch = konstante Wärme + weniger Kondensatbildung im Schlauch

Das komplette Spektrum der klinischen Technologie in einem stilvollen, leicht zu handhabenden Gerät – damit Sie Ihre Patienten und höhere Effizienz.



Wasserkammer
Kammer aus einem Stück. Fasst 420 mL Wasser und ist spülmaschinengeeignet.



InfoUSB 2 / USB-Anschluss
Im USB-Anschluss befindet sich ein InfoUSB 2-Stick, um die Therapiestunden des Patienten, die Wirksamkeits- und Flussdaten aufzuzeichnen.



Loggien von Fisher & Paykel Healthcare in einem bietet das ICON+ bessere Patientenversorgung



Mehr Kommunikation. Mehr Ergebnisse.

Die zeitgerechte und effiziente Datensammlung zur Schlafqualität ist von entscheidender Bedeutung, wenn man die Bedürfnisse des Patienten verstehen und die Therapieergebnisse beeinflussen will. Info-Technologien bieten eine Reihe von Optionen, um so Ihre Ansprüche bestmöglich zu erfüllen.



Datenkommunikation

- InfoView™: Der Patient kann Schlafdaten vom Display des Geräts übertragen, die dann mit Hilfe der F&P InfoSmart™-Software überprüft werden.
- Die Funktionen von InfoUSB and InfoUSB (Web) wurden zu einer Einheit zusammengefasst, damit wird die Datenabfrage noch einfacher und kosteneffektiver. Schlafdaten können über das Internet versendet werden†, der Patient kann seine Schlafdaten von zuhause aus oder von jedem Windows®-basierten Computer mit Internetverbindung hochladen oder der InfoUSB-Datenstick kann per Post zum Datendownload gesendet werden.

Datenberichte

- Die F&P InfoSmart-Software erzeugt umfassende grafische Darstellungen und Berichte von Patientendaten, wie z.B.
- Auswahl eines Zeitraums von 30, 60, 90 oder 365 Tagen für Zusammenfassungsdaten
 - Anpassbare Zusammenfassungsdaten für bis zu 180 Tage
 - 7 Tage detaillierte Daten
 - Kumulative zusammengefasste Daten ab der ersten Anwendung.



Kammerdeckel
Muss korrekt befestigt werden, damit optimaler Druck zugeführt wird, und lässt sich auch als Tragegriff für das Gerät benutzen.



Systemmenü
Vereinfachte Benutzung mit Einfach-Modus für Patienten und leicht zugänglichem Klinikermenü.



SmartDial™
Selbsterklärende Steuerungen erlauben die One-Touch-Navigation des Systemmenüs nach dem Drücken-Drehen-Drücken-Prinzip.

Technische Daten

Abmessungen	160 x 170 x 220 mm (6,3 x 6,7 x 8,7 Zoll)
Gewicht	2,2 kg (4,8 lb) Verpackungsgewicht: 4,0 kg (8,7 lb)
Leistung	Druckbereich: 4–20 cmH ₂ O
Geräuschpegel	<30 dBA
Fassungsvermögen Wasserkammer	420 mL bis zur Maximalfülllinie
Eingehaltene Normen	IEC60601-1: 1998, AS/NZS 3200.1.0: 1998, EN60601-1: 1990 + A1–A2
InfoUSB Datenspeicherung	<p>Auto und Premo Der InfoUSB speichert bis zu 365 Tage zusammengefasste Compliance- und Wirksamkeitsdaten, 7 Tage detaillierte Wirksamkeitsdaten (AHI, Druck, Leckagen) sowie kumulative Daten ab der ersten Anwendung.</p> <p>Novo Der InfoUSB speichert bis zu 365 Tage zusammengefasste Compliance-Daten sowie kumulative Daten ab der ersten Anwendung.</p>

Daten zur Stromversorgung

Nennspannung	Nennlast	Nennfrequenz
100–115 V	1,27 A (1,43 A max.)	50–60 Hz/400 Hz
220–240 V	1,07 A (1,21 A max.)	50–60 Hz

F&P ICON+ Funktionen

Beschreibung	Auto	Premo	Novo
Vollständig integriert	•	•	•
ThermoSmart-Technologie*	•	•	•
Automatisch anpassender Druck	•		
Wirksamkeitsprotokoll	•	•	
Compliance-Berichte	•	•	•
InfoUSB 2	•	•	•
SensAwake	•	•	
Proportionales Hochfahren (Rampe)	•	•	
Automatische Höhenanpassung	Automatisch	Automatisch	Manuell
Leckageausgleich	•	•	
Uhr und AlarmTunes™	•	•	•
InfoSmart-Software	•	•	•

F&P ICON+ Modelle

Steckertyp	Auto	Premo	Novo
Australasien/China	ICONAAA	ICONPBA	ICONNAA
Europa	ICONAAE/ICONAHE**	ICONPAE**/ICONPBE/ ICONPHE**	ICONNAE
Großbritannien/Hongkong	ICONAAK	ICONPBK	ICONNAK
Nordamerika (Modellnummern mit HT bezeichnen Geräte mit beheiztem Beatmungsschlauch)	ICONAAN/ICONAAN-HT	ICONPBN/ICONPBN-HT	ICONNAN/ICONNAN-HT
Brasilien	ICONAAB+	ICONPBB+	ICONNAB+
Japan/Taiwan	ICONAAJ	ICONPBJ	ICONNAJ

* Zur Nutzung der ThermoSmart Technologie muss der ThermoSmart Beatmungsschlauch in einigen Ländern als Zubehör erworben werden.
** Dieser Artikel kann je nach Land variieren.







Packungsinhalt von F&P ICON+

- 1 x CPAP
- 1 x Transporttasche
- 1 x Wasserkammer
- 1 x Kammerdeckel
- 1 x Beatmungsschlauch*
- 1 x InfoUSB 2
- 1 x InfoUSB Mailer
- 1 x Gebrauchsanleitung
- 1 x Ersatzluftfilter

Ersatzteile

- 900ICON200 Wasserkammer
- 900ICON202 InfoUSB 2
- 900ICON203 InfoUSB 2**
- 900ICON204 Winkelstück
- 900ICON205 Sauerstoffwinkelstück
- 900ICON206 Ausgangsdichtung
- 900ICON208 ThermoSmart Beatmungsschlauch
- 900HC221 Beatmungsschlauch
- 900ICON503 Luftfilter
- 900ICON218 Filterabdeckung
- 900ICON214 Deckel, glänzend Silber
- 900ICON216 Deckel, matt grau
- 900ICON217 Deckel, schwarz
- 900ICON315 Soft-Transporttasche
- 185046221 Gebrauchsanleitung (Englisch, Französisch, Spanisch)
- 185048028 Gebrauchsanleitung (Englisch, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch)
- 185047918 Gebrauchsanleitung (Englisch, Japanisch, Traditionelles Chinesisch)
- 185045354 Mehrsprachige Gebrauchsanleitung
- 900ICON110 CD für Fachpersonal
- 185047919 Handbuch für Fachpersonal (Englisch, Japanisch, Traditionelles Chinesisch)
- 900SW100 F&P InfoSmart CD
- 900ICON112 F&P Studio™ CD

Produktinformation

-  **Z078** Neuseeländisches C-Tick-Zeichen bezüglich Funkstörung
-  **Latexfrei**
- IPX2** Tropfwassergeschützt
-  **UL** Klassifiziert nach UL
-  **Medizinisches elektrisches Gerät der Klasse II**
- CE0123** Erfüllt die Vorgaben der Medizinprodukt-richtlinie 93/42/EWG
-  **Entsorgung des Geräts:** Dieses Gerät enthält Elektronikkomponenten. Bitte entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie es gemäß den geltenden Richtlinien für Elektronikgeräte.
-  **Entsorgung des Zubehörs:** Packen Sie die Maske, den Beatmungsschlauch und die Wasserkammer in eine Mülltüte und entsorgen Sie diese mit dem Hausmüll.